

Luvas Vinil Descartáveis



Descrição geral

Luva para procedimento não cirúrgico em policloreto de vinila (vinil) sem pó, superfície lisa, não estéril, isenta de látex, ambidestra, atóxica e apirogênica, uso único.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CE PPE Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN ISO 13485:2016 ; EN455
Fabricante	RAYSEN (TIANJIN) HEALTHCARE PRODUCTS CO. LTD No.3 Huanyuxi Road Tianyu Technology Park, Jinghai
REF	LV01
Nome Produto	Luvas de Vinil Não Estéreis e sem Pó
Material	100% policloreto de vinila
Classificação	Classe I
Design	Cano Curto
Cor	-
Tamanhos	S, M, L, XL
Validade	5 anos

APLICAÇÃO

Luvas 100% cloreto de polivinila (PVC) - sem pó. Embalado em um saco ou caixa.

INDICAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO:

Indicada para proteção dos profissionais de saúde em procedimentos onde não haja o contato com fluidos corporais passíveis de contaminação. Para utilização do produto, realizar assepsia prévia das mãos; Calçar as luvas cuidadosamente com as mãos secas; Executar o procedimento; Após o uso, retirar a luva descartando-a imediatamente em local para materiais potencialmente contaminados; Não reutilizar ou esterilizar a luva após seu uso.

ARMAZENAGEM

Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, umidade e calor excessivo. Temperatura ideal de armazenamento: 10 a 40°C.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES:

Produto de uso único; Produto não estéril; Proibido reprocessar; Destruir após o uso; Proteja este produto do calor, da umidade e da luz; Produto isento de látex natural; Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

INSTRUÇÕES (COMO COLOCAR AS LUVAS)



1. Depois de lavar bem as mãos, retirar 1 luva da caixa original



2. Tocar apenas em zonas restritas da luva, correspondendo à região do pulso



3. Colocar a 1ª luva



4. Retirar a 2ª luva, tocando apenas na zona correspondente à região do pulso



5. Para evitar tocar na pele do antebraço com a luva já vestida, pegar na superfície externa da luva que estamos a vestir, com os dedos dobrados da outra mão




6. Uma vez colocadas as luvas, as mãos não devem tocar em mais nada que não seja o que está contemplado no procedimento a efetuar


Luvas Vinil Descartáveis




INSTRUÇÕES (COMO RETIRAR AS LUVAS)

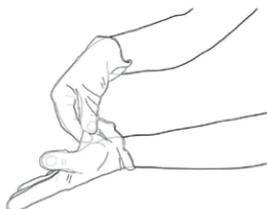

1. Pegar numa luva na zona do pulso, e sem tocar na pele do antebraço, puxar a luva completamente.

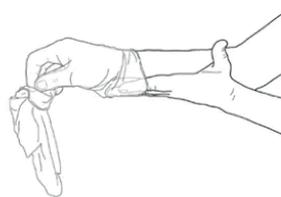

2. Manter a luva pressionada entre os dedos, e colocar a mão contrária (sem luva) entre a luva e o pulso. Remover a segunda luva, rolando até cobrir completamente a primeira

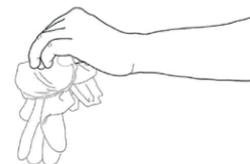

3. Colocar as luvas no contentor apropriado

Descrição geral

Luva para procedimento não cirúrgico em policloreto de vinila (vinil) sem pó, superfície lisa, não estéril, isenta de látex, ambidestra, atóxica e apirogênica, uso único.