

# FFP3 Máscara Protectora



## Descrição Geral

Oferece conforto leve e proteção respiratória eficaz contra poeira e névoas com eficiência de filtração de 95%.

## Uso pretendido

A forma convexa, o design de alça dupla, a espuma nasal e a presilha nasal garantem um uso confortável em uma variedade de tamanhos de rosto.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulação	PPE Regulation (EU) 2016/425
Normas	EN149:2001+A1:2009
Fabricante	DONGGUAN RYSAM MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD No. 302, Building, Dongkeng village, DongGuan, GuangDong, China
REF	FFP3
Nome do produto	Máscara de Proteção com Válvula
Design	Eficiência de filtração, Elásticos e clipe nasal ajustável
Material	Não reutilizável
Cor	Branco
Dimensões	Tamanho único
Peso	3-4 g/pc

## INSTRUÇÕES

1. Certifique-se de que o clipe nasal de metal esteja para cima.
2. Puxe a correia superior sobre a cabeça até que ela fique no topo da cabeça, acima das orelhas.
3. Puxe a alça inferior sobre a cabeça até que fique logo abaixo das orelhas.
4. Usando as duas mãos, começando pela parte superior, molde a presilha de metal ao redor do nariz para obter uma vedação segura.

## APLICAÇÃO

Com o design da ponte nasal, a máscara é mais flexível e se adapta a quase todos os formatos de rosto. Filtra eficazmente as bactérias, pó, pelo de animais e protege a saúde.

## DICAS

- Lave as mãos antes de usar uma máscara.
- Máscara facial de respirador FFP3 / N99
- Com válvula
- Filtração > 99%
- Não reutilizável / descartável
- É muito fácil e conveniente usar durante o dia sem causar dor.

