

# FFP3C+ Máscara Protetora



## Descrição Geral

Máscara de Proteção descartável. Não cirúrgica.

## Uso pretendido

Esta máscara descartável é projetada para uso de proteção geral. Destina-se a reduzir a exposição do utilizador a certas partículas transportadas pelo ar, incluindo aerossóis de partículas pequenas e gotas grandes (todos aerossóis livres de óleo). Protege da exposição a aerossóis biológicos, incluindo vírus e bactérias.

Este produto não é uma máscara cirúrgica e não deve ser usado em salas de operação ou operações invasivas e também não é adequado para proteção contra gases e vapores nocivos, ou para ambientes hipóxicos, operações subaquáticas, vazamento e combate a incêndio. Este produto não é adequado para locais de trabalho com chamas abertas (como soldagem, fundição, etc.).



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulação	PPE Regulation (EU) 2016/425
Normas	EN149:2001+A1:2009
Fabricante	SHANGHAI EARNTZ NONWOVEN CO., LTD No 88, Jiangong Road, Fengjing Town, Jinshan, District, Shanghai, China
REF	FFP3C+
Nome do produto	FFP3 Máscara de Proteção
Design	Formato em V, Alças e clipe nasal ajustável
Material	Camada externa e interna: Tecido não tecido Spunbond. Filtro: tecido não tecido derretido. Pinça para nariz: em alumínio Alça de ouvido: polipropileno elástico
Cor	Branco
Camadas	4

## INSTRUÇÕES

1. Lave as mãos antes de colocar a máscara. Escolha o tamanho correto da máscara e certifique-se de que não haja defeitos.
2. Posicione a máscara sob o queixo com a pinça para nariz para cima.
3. Alongue levemente as alças na parte de trás da orelha e solte as alças.
4. Não toque na superfície frontal da máscara.
5. Execute uma verificação de ajuste, sem tocar na máscara com as mãos.
6. Lave as mãos após remover a máscara.

## ARMAZENAMENTO

1. As máscaras devem ser armazenadas num ambiente limpo para evitar danos, poeira, luz solar direta, alta temperatura e poluição química prejudicial.
2. Deve ser armazenado adequadamente longe de áreas contaminadas.
3. Proteja contra compressão mecânica, humidade, alta temperatura, luz solar e produtos químicos corrosivos.
4. Recomenda-se que o produto seja armazenado em uma temperatura de 28,4 ° F (-2 ° C) a 86 ° F (+30 ° C) e humidade relativa de 80% ou menos.

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Oferece equilíbrio ideal entre proteção e respirabilidade (eficiência do filtro de até 95%).
- Tiras largas e elásticas para as orelhas são confortáveis para uso prolongado.
- Personalizável com clipe nasal.
- Dobrável e fácil de transportar.
- Apenas para uso geral.
- As máscaras têm uma data de validade de 2 anos.
- Fornece cobertura total do nariz ao queixo.
- Este produto não é um dispositivo médico.
- Este produto não pode ser usado em operações cirúrgicas.
- Não é adequado para crianças menores de 3 anos.
- Uso único. Não reutilizável. Não use mais de 8 horas.

