

# FFP2 Máscara Protectora



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CE   PPE Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN ISO 13485: 2016
Fabricante	RAYSEN HEALTHCARE PRODUCTS CO., Ltd. No. 3, Huanyuxi Road, Tianyu Techonoly Park, Jinghai District - China
REF	FFP2
Nome do produto	Máscara de Proteção
Design	Eficiência de filtração, Elásticos e clipe nasal ajustável
Material	Algodão não descartável
Cor	Branco
Dimensões	Tamanho único
Peso	3-4 g/pc

## INSTRUÇÕES

1. Certifique-se de que o clipe nasal de metal esteja para cima.
2. Puxe a correia superior sobre a cabeça até que ela fique no topo da cabeça, acima das orelhas.
3. Puxe a alça inferior sobre a cabeça até que fique logo abaixo das orelhas.
4. Usando as duas mãos, começando pela parte superior, molde a presilha de metal ao redor do nariz para obter uma vedação segura.

## APLICAÇÃO

Com o design da ponte nasal, a máscara é mais flexível e se adapta a quase todos os formatos de rosto. Filtra eficazmente as bactérias, pó, pelo de animais e protege a saúde.

## DICAS

1. Lave as mãos antes de usar uma máscara.
2. As máscaras descartáveis geralmente são substituídas a cada 8 horas e não podem ser reutilizadas.
3. É muito fácil e conveniente usar durante o dia sem causar dor.

### Descrição Geral

Oferece conforto leve e proteção respiratória eficaz contra poeira e névoas com eficiência de filtração de 98%.

### Uso pretendido

A forma convexa, o design de alça dupla, a espuma nasal e a presilha nasal garantem um uso confortável em uma variedade de tamanhos de rosto.

