



Descrição Geral

Fato de proteção contra as partículas secas e as projeções de produtos líquidos como aerossóis.

Uso pretendido

Proteção contra os agentes infecciosos e inúmeras substâncias químicas inorgânicas de baixa concentração e contra a contaminação por partículas radioativas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CE PPE Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN ISO 13485: 2016 ; EN 14126
Fabricante	RAYSEN HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD No. 3, Huanyuxi Road, Tianyu Techonoly Park, Jinghai District - China
REF	P01
Nome do Produto	DM - Fato Cirúrgico Descartável
Design	Elástico no capuz, tornozelos, punhos e cintura Fecho Zip escondido por carcela
Material	65%PP (Polipropileno) + 35%PE (Polietileno)
Cor	Branco
Validade	5 anos
Tamanhos	M / L / XL / XXL

INSTRUÇÕES

1. Higienize as mãos com água e sabão ou uma solução à base de álcool, antes de vestir o fato.
2. Coloque o fato com a face interna voltada para o corpo e a face externa voltada para fora.
3. Ajuste corretamente o fato ao corpo. Em caso de o trabalho ser feito na presença de partículas sólidas suspensas na atmosfera (aerossóis) ou respingos / gotículas, é aconselhável cobrir o Zip com carcela.
4. A remoção do fato deve ser feita de maneira a não tocar no corpo, virando o fato do avesso.
5. Quando descartar o fato certifique-se que o mesmo seja colocado num recipiente apropriado.
6. Depois de descartar o fato deverá realizar nova higienização das mãos.

USO

Estes fatos devem ser usados para proteção contra borrifos leves, aerossol líquido ou baixa pressão, baixo volume, respingos, partículas sólidas no ar e contaminação radioativa, agentes infecciosos.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

1. Armazene este produto em local fresco e seco.
2. As partes expostas do corpo devem ser cuidadosamente cobertas e protegidas pelo usuário.
3. Antes de usar, verificar as boas condições do produto.
4. Descarte após o uso. O descarte é limitado apenas por qualquer possível contaminação que possa ter ocorrido durante o uso.

