

Máscara FFP1 NR



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulação	PPE Regulation (EU) 2016/425
Normas	EN149:2001+A1:2009
Fabricante	HANDAN HENGYONG PROTECTIVE AND CLEAN PRODUCTS CO., LTD C-1-901, Yuyuan Plaza, 9 Yuhua West Road, Shijiazhuang, Hebei, China
CE	2797
REF	FFP1HYT
Modelo	HY8910
Nome do Produto	Máscara de Proteção FFP1 NR
Design	Meia Máscara de Filtragem sem Válvula, Tipo dobrável com Elásticos, Almofada Nasal e Clipe Nasal
Material	Camada Interna: Tecido Spunbonded de Polipropileno, Branco Filtro: Fibra de filtro fundido de Polipropileno Camada de pré-filtro: Tecido de filtro de poliéster Camada Externa: Tecido Spunbonded de Polipropileno, Branco Clipe Nasal: Alumínio + PP Espuma nasal: Espuma preta macia, material PE Elásticos: Tira de elastano, Amarelo
Cor	Branco
Resistência de Respiração	Eficiência de filtração bacteriana $\geq 80\%$ Resistência à Inalação $\leq 2.1\text{mbar @ } 95\text{ L/min}$ Resistência à exalação $\leq 3.0\text{mbar @ } 160\text{L/min}$
Dimensão da Máscara	190x85mm
Validade	3 anos

INSTRUÇÕES

Como colocar a máscara:

1. Separe as bordas da máscara para abri-la totalmente.
2. Curve ligeiramente o fio do nariz para formar uma curva suave.
3. Segure a máscara de cabeça para baixo para expor as duas faixas de cabeça.
4. Usando os dedos indicadores e polegares, separe as duas faixas de cabeça.
5. Enquanto segura as faixas de cabeça com os dedos indicadores e polegares, coloque a máscara sob o queixo.
6. Puxe as faixas sobre a cabeça.
7. Solte a faixa inferior com seus polegares e posicione-a na base do pescoço.
8. Posicione a restante faixa de cabeça no topo da sua cabeça.
9. Adapte o arame nasal à ponte do nariz pressionando firmemente com os dedos.
10. Continue a ajustar a máscara e prenda as bordas até sentir que obteve um bom ajuste facial, agora faça uma verificação do ajuste.

Como remover a máscara:

1. Segure as faixas da parte inferior da máscara, depois as da parte superior e remova sem tocar na parte frontal da máscara.

DICAS

Respeitar e seguir todas as instruções. Caso contrário a funcionalidade da máscara respiratória poderá ficar comprometida.

Este produto não fornece oxigénio. Utilizar somente em locais suficientemente arejados que apresentem uma concentração de oxigénio suficiente. Não utilizar esta máscara quando a concentração de oxigénio ficar a baixo de 19%.

Não utilizar em atmosferas explosivas.

A máscara respiratória usada deve ser descartada logo após o uso.

Proteger a embalagem da exposição solar directa.

Descrição Geral

Design plano super dobrável, estrutura 3D e grande área de filtragem. Tiras de cabeça sem látex e clipe nasal inserido Sem válvula de expiração, uso único.
BFE $\geq 80\%$

