

FFP2 NR Máscara Protetora



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulação	PPE Regulation (EU) 2016/425
Normas	EN149:2001+A1:2009
Fabricante	SU BIYOMEDİKAL SISTEMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN.VE TIC. A. S. Orhangazi mah. 1673. Sok. No: 20 Esenyurt Istanbul Turkey
REF	MM.P2.01
Classificação	FFP2 NR
Nome do Produto	Máscara de Proteção FFP2
Design	Meia Máscara de Filtragem sem Válvula, Tipo dobrável com Elásticos e Clipe Nasal
Material	Tecido Não tecido de Polipropileno
Cor	Preto
Camadas	5 Camadas de proteção
Resistência de Respiração	Resistência à Inalação - 95 L/min: $\leq 2.4\text{mbar}$ Resistência à exalação - 160l/min: $\leq 3.0\text{mbar}$
Penetração no filtro	95 l/min: $\leq 6\%$
Validade	5 anos

INSTRUÇÕES

1. Lave as mãos antes de colocar a máscara.
2. A parte do nariz está voltada para cima, o lado sem clipe nasal está voltado para o rosto.
3. Segure a sua máscara pelos elásticos e coloque-as ao redor das orelhas.
4. Coloque os dedos no meio do clipe nasal e pressione-o para se adaptar à forma do seu nariz.
5. Continue a ajustar a máscara e prenda as bordas até sentir que obteve um bom ajuste facial, agora faça uma verificação do ajuste.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em ambiente bem ventilado, escuro e seco. Manter afastado de fogo, poluentes e possíveis fontes de poluição. Além disso, a temperatura do armazenamento de transporte: $-20^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$, Humidade relativa: $<80\% \text{ RH}$

CUIDADOS

Verifique o ajuste da máscara antes de usar.
Não use a máscara em atmosfera explosiva.
Após o uso, descarte a máscara de acordo com os regulamentos locais.
A máscara é apenas para uso único.

Descrição Geral

Máscara de Proteção descartável.
Não cirúrgica.

Uso pretendido

Estas máscaras oferecem uma proteção de cinco camadas para se proteger contra vírus e inalação de substâncias perigosas. Possui um material de alta qualidade, que reduz a irritação da pele.

