

Luas de Nitrilo Não Estéreis



Descrição geral

As luvas são utilizadas para proteger os profissionais de saúde e os pacientes contra possíveis contaminações, com o objetivo de prevenir doenças ou danos, em hospitais, indústrias alimentícias ou outras indústrias, laboratórios, entre outros.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CEE DM Regulation (EU) 2017/745
Norma	ISO 9001:2015 ; EN ISO 13485:2016 ; EN ISO 374-1: 2016 : EN 374-4:2013 ; EN ISO 374-5:2016; ISO 455-1; ISO 455-2; EN 455-3 ; EN 455-4 ; EN 420:2003+A1:2009
Fabricante	MAXTER GLOVE MANUFACTURING SDN BHD Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles of Jalan Meru, Malaysia
REF	PFLN-PTRB
Nome Produto	Luvas em Nitrilo – Descartáveis, Sem pó – Punho longo
Material	Nitrilo
Classificação	Classe I
Design	Cano Longo
Cor	Azul
Tamanhos	XS, S, M, L, XL, XXL
Validade	5 anos a partir da data de fabricação

DIMENSÕES DAS LUVAS

TAMANHO	PESO DA LUVA (G)	LARGURA DA PALMA (MM)		COMPRIMENTO (MM)	
		ASTM D6319	MAXTER	ASTM D6319	MAXTER
XS	4.9 ± 0.2	70 ± 10	70 - 79	MIN. 220	290 ± 10
S	5.3 ± 0.2	80 ± 10	80 - 89	MIN. 220	290 ± 10
M	5.7 ± 0.2	95 ± 10	90 - 99	MIN. 230	290 ± 10
L	6.1 ± 0.2	110 ± 10	100 - 109	MIN. 230	290 ± 10
XL	6.5 ± 0.2	120 ± 10	110 - 119	MIN. 230	290 ± 10
XXL	7.3 ± 0.2	-	120 - 129	-	290 ± 10

ESPESSURA

LOCALIZAÇÃO DA MEDIDA DE ESPESSURA	PAREDE ÚNICA (MM)	
	ASTM D6319	MAXTER
DEDO	MIN. 0.05	MIN. 0.13
PALMA	MIN. 0.05	MIN. 0.10
PUNHO	N/A	MIN. 0.07

PROPRIEDADES FÍSICAS

	ANTES DE ENVELHECER		DEPOIS DE ENVELHECER	
	ASTM D6319	MAXTER	ASTM D6319	MAXTER
RESISTÊNCIA À TRACÇÃO (MPa)	MIN. 14	MIN. 14	MIN. 14	MIN. 14
ALONGAMENTO (%)	MIN. 500	MIN. 500	MIN. 400	MIN. 400
FORÇA NA PAUSA (N)	N/A	MIN. 6	N/A	MIN. 6

COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES

NOME QUÍMICO	CAS #
BORRACHA DE ACRILONITRILA BUTADIENO (NBR)	9003-18-3
DIÓXIDO DE TITÂNIO	13463-67-7
ÓXIDO DE ZINCO	1314-13-2
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO	1310-58-3
ENXOFRE	7704-34-9
ZINCO DI-N-BUTIL DITIOCARBAMATO	136-23-2
AZUL DE FTALOCIANINA DE COBRE	147-14-8

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Não aplicável
- Contato com a pele: Não aplicável
- Inalação: Não aplicável
- Ingestão: Procure atendimento médico se ingerido
- Indicação de atenção médica imediata e notas para o médico: Não necessária

Luvras de Nitrilo Não Estéreis



Descrição geral

As luvas são utilizadas para proteger os profissionais de saúde e os pacientes contra possíveis contaminações, com o objetivo de prevenir doenças ou danos, em hospitais, indústrias alimentícias ou outras indústrias, laboratórios, entre outros.

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

a) Meios de extinção adequados (e inadequados):

Espuma, CO₂, pó extintor seco e jato de água pulverizada.

b) Riscos específicos decorrentes do produto químico (por exemplo, natureza de quaisquer produtos de combustão perigosos):

Em caso de incêndio, podem surgir vapores tóxicos e / ou irritantes.

c) Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros:

Como no caso de incêndio, use um aparelho de respiração autônomo e equipamento de proteção individual completo.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

a) Precauções para manuseio seguro: Não aplicável

b) Condições para armazenamento seguro (incluindo quaisquer incompatibilidades):

Armazenar em local fresco e seco.

Evite calor excessivo (40 °C, 104 °F).

A caixa aberta deve ser protegida da exposição ao sol direto ou luz fluorescente.

A degradação do produto pode ser acelerada pela exposição ao ozônio e exposição prolongada à luz ultravioleta.

INSTRUÇÕES (COMO COLOCAR AS LUVAS)



1. Depois de lavar bem as mãos, retirar 1 luva da caixa original



2. Tocar apenas em zonas restritas da luva, correspondendo à região do pulso



3. Colocar a 1ª luva



4. Retirar a 2ª luva, tocando apenas na zona correspondente à região do pulso




5. Para evitar tocar na pele do antebraço com a luva já vestida, pegar na superfície externa da luva que estamos a vestir, com os dedos dobrados da outra mão




6. Uma vez colocadas as luvas, as mãos não devem tocar em mais nada que não seja o que está contemplado no procedimento a efetuar

INSTRUÇÕES (COMO RETIRAR AS LUVAS)

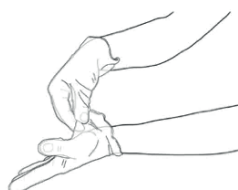

1. Pegar numa luva na zona do pulso, e sem tocar na pele do antebraço, puxar a luva completamente.

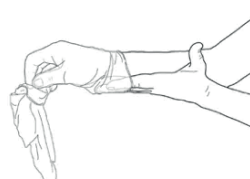

2. Manter a luva pressionada entre os dedos, e colocar a mão contrária (sem luva) entre a luva e o pulso. Remover a segunda luva, rolando até cobrir completamente a primeira



3. Colocar as luvas no contentor apropriado