

FFP2 NR MINI Máscara Protetora



Descrição Geral

Máscara de Proteção descartável. Não cirúrgica.

Uso pretendido

Estas máscaras oferecem uma proteção de seis camadas para se proteger contra vírus, inalação de substâncias perigosas, gases e odores. Possui um material de alta qualidade, que reduz a irritação da pele.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulação	PPE Regulation (EU) 2016/425
Normas	EN149:2001+A1:2009
Fabricante	ZHEJIANG BELA FLOR PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD No. 45, Suhua Street, Suxi Town, Yiwu, Zhejiang Province, China
REF	FFP2MINI
Modelo	A2 MINI
Nome do Produto	Máscara de Proteção FFP2 NR
Design	Meia Máscara de Filtragem sem Válvula, Tipo dobrável com Elásticos e Gancho, Almofada Nasal e Clipe Nasal
Material	Tecido não tecido, Tecido fundido
Cor	Branco
Camadas	5 Camadas
Resistência de Respiração	Eficiência de Filtragem $\geq 94\%$ @ 0.6 μ m, 95l/min Resistência à Inalação ≤ 3.0 mbar @ 95 L/min Resistência à exalação ≤ 3.0 mbar @ 160l/min
Dimensão da Máscara	95mm*140mm
Validade	3 anos

INSTRUÇÕES

1. Lave as mãos antes de colocar a máscara.
2. A parte do nariz está voltada para cima, o lado sem clipe nasal está voltado para o rosto.
3. Segure a sua máscara pelos elásticos e coloque-as ao redor das orelhas.
4. Coloque os dedos no meio do clipe nasal e pressione-o para se adaptar à forma do seu nariz.
5. Continue a ajustar a máscara e prenda as bordas até sentir que obteve um bom ajuste facial, agora faça uma verificação do ajuste.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em ambiente bem ventilado, escuro e seco. Manter afastado de fogo, poluentes e possíveis fontes de poluição. Além disso, a temperatura do armazenamento de transporte: -20C ~ 38C, Humidade relativa: <80% RH

CUIDADOS

- Verifique o ajuste da máscara antes de usar.
- Não use a máscara em atmosfera explosiva.
- Após o uso, descarte a máscara de acordo com os regulamentos locais.
- A máscara é apenas para uso único.

