

# LUVAS DE LATEX ORTOPÉDICAS SEM PÓ, ESTERILIZADAS



## DESCRIÇÃO GERAL

Recomenda-se o uso de luvas por para reduzir o risco de contaminação das mãos de profissionais da saúde com sangue e outros fluidos corporais; para reduzir o risco de disseminação de micro-organismos no ambiente e de transmissão do profissional da saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente para outro.

As luvas devem, portanto, ser utilizadas durante todas as atividades de atendimento ao paciente que podem envolver a exposição a sangue e outros fluidos corporais (inclusive o contato com membranas mucosas e pele não intacta), durante as precauções de contato e situações de surto.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


REGULAMENTAÇÃO	Regulamento DM(UE)2017/745   Regulamento EPI(UE)2016/425
NORMA	EN 455-1:2020 ; EN 455-2:2015 ; EN 455-3:2015 ; ISO 13485:2016 ; EN ISO 21420:2020 ; EN ISO 374-1:2016 ; EN ISO 374-2:2019 ; EN 16523-1:2015 ; EN ISO 374-4:2019 ; ISO 16604:2004 ; EN ISO 374-5:2016
FABRICANTE	GUILIN HBM HEALTH PROTECTIONS, INC. No. 1-2, Shujing East Road, Economic and Technological Development Area, Guilin, China
MANDATÁRIO	HBM Medical Coliemore House, Coliemore Road, Dalkey, Co Dublin, Ireland
REF	Tamanho 6.0 - MLOG60 Tamanho 6.5 - MLOG65 Tamanho 7.0 - MLOG70 Tamanho 7.5 - MLOG75 Tamanho 8.0 - MLOG80 Tamanho 8.5 - MLOG85 Tamanho 9.0 - MLOG90
NOME DO PRODUTO	Luvas de Latex Ortopédicas Sem Pó, Esterilizadas
MATERIAL	Latex, Sem Pó
DESIGN	Cano Curto
COMPRIMENTO	Mínimo 240 MM
COR	Castanhas, Não clorado
QUANTIDADE	Caixa de 50 pares

## TABELA MARCAÇÃO CE

DM	REG. 2017/745	CLASSE IIa	EN 455	AQL 0,65	CE <sub>2787</sub>
EPI	REG. 2016/425	CATEGORIA III	EN 374, EN 21420, EN16523	AQL 0,65	CE <sub>2777</sub>

## INSTRUÇÕES (COMO COLOCAR AS LUVAS)

1. Lavar e secar as mãos;
2. Abrir a embalagem, mantendo a técnica asséptica, ou seja, sem contaminar o conteúdo do pacote;
3. Identificar as luvas da mão direita e esquerda;
4. Com o polegar e os primeiros dedos da mão não dominante, pegar a borda do punho da mão dominante, tocando somente a superfície interna da luva;
5. Puxar cuidadosamente a luva sobre a mão dominante, assegurando de que o punho não se enrole no braço;
6. Com a mão dominante enluvada, colocar os dedos suavemente sob o punho da segunda luva, tocando somente na superfície externa da luva;
7. Puxar cuidadosamente a segunda luva sobre a mão não dominante. Cuidado para não tocar superfície estéril com não-estéril;
8. Uma vez que a segunda luva já tenha sido calçada, entrelaçar os dedos das duas mãos e corrigir a posição das luvas.

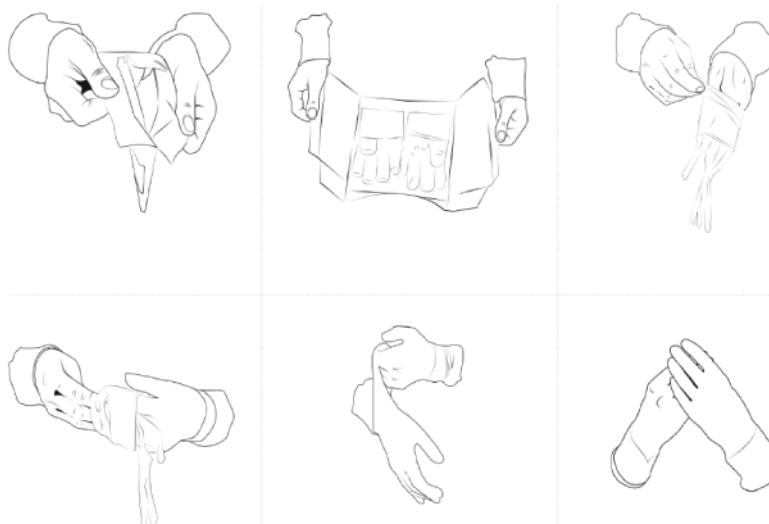

# LUVAS DE LATEX ORTOPÉDICAS SEM PÓ, ESTERILIZADAS

**enerre**  
P H A R M A



## DESCRIÇÃO GERAL

Recomenda-se o uso de luvas por para reduzir o risco de contaminação das mãos de profissionais da saúde com sangue e outros fluidos corporais; para reduzir o risco de disseminação de micro-organismos no ambiente e de transmissão do profissional da saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente para outro.

As luvas devem, portanto, ser utilizadas durante todas as atividades de atendimento ao paciente que podem envolver a exposição a sangue e outros fluidos corporais (inclusive o contato com membranas mucosas e pele não intacta), durante as precauções de contato e situações de surto.



## EMBALAGEM

Selada individualmente em embalagem estéril.

## COMPONENTES / COMPONENTES PERIGOSOS

Algumas luvas podem conter componentes conhecidos por serem uma possível causa de alergia para pessoas alérgicas a elas, que podem desenvolver irritação de contato e / ou reação alérgica. Luvas de látex de borracha natural podem causar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas. Em caso de reação alérgica, procure atendimento médico imediatamente.

## INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

No caso de um dispositivo estéril, a esterilidade é garantida, exceto se o sistema de embalagem primária estiver danificado ou for aberto antes da utilização. Os produtos devem ser armazenados em condições secas e frescas e sem luz solar.

## LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

## EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

## ELIMINAÇÃO

Cada luva deve ser eliminada de acordo com o processo de gestão de resíduos.

## APRESENTAÇÃO



**enerre**  
P H A R M A