

BATA DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL



DESCRIÇÃO GERAL

Equipamento de Segurança,
Bata Descartável Não Estéril.

USO PRETENDIDO

Adequado para médicos,
enfermeiros, profissionais de
saúde, laboratório de diagnóstico
profissionais, laboratório
físico-químico e biológico
e estudantes.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	2017/745 (UE)
NORMA	EN ISO 14971:2019 ; EN ISO 15223-1:2021 ; EN ISO 20417:2021 ; EN ISO 10993-1:2020 ; EN ISO 10993-5:2009 ; EN ISO 10993-10:2013 ; EN 13795-1:2019
FABRICANTE	HUBEI KANGNING PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD Special No. 1, Xuefu Road, 433000, Xiantao, Hubei China
REPRESENTANTE AUTORIZADO UE	SUNGO EUROPE B.V. Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands
REF	KN024
NOME DO PRODUTO	Bata Descartável Não Estéril
DESIGN	Com Punho elástico em Malha, Atilhos na Cintura e no Pescoço
MATERIAL	SMMS Tecido Não Tecido
COR	Azul
DIMENSÃO	120 x 140 cm
GRAMAGEM	SMS 45gsm
VALIDADE	5 anos
EMBALAGEM	10 unidades/embalagem ; 50 embalagens/caixa
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Maio 2022

CARACTERÍSTICAS

Sem látex.
Resistente à abrasão.
Barreira contra vírus e poeiras.
Peso leve e macio.
Boa adaptação, tacto e desempenho.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A bata deve ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto:

- Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a bata.
- Colocação da bata com a face interna virada para o corpo, e a face externa virada para fora.
- Ajuste da bata ao corpo, tendo em atenção a cobertura dos membros superiores e inferiores e o ajuste adequado nas extremidades, fechando todos os sistemas de ajuste.
- A remoção da bata deve ser feita de forma a não tocar no corpo virando a bata do avesso.
- A bata deve ser descartada para um contentor de resíduos hospitalares adequados.
- Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da bata.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardados de potencial contaminação. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

ELIMINAÇÃO

Cada bata deve ser eliminada de acordo com o processo de gestão de resíduos.

BATA DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL



APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



DESCRIÇÃO GERAL

Equipamento de Segurança,
Bata Descartável Não Estéril.

USO PRETENDIDO

Adequado para médicos,
enfermeiros, profissionais de
saúde, laboratório de diagnóstico
profissionais, laboratório
físico-químico e biológico
e estudantes.

