

BATA DESCARTÁVEL DE MANGA CURTA



DESCRIÇÃO GERAL

Equipamento de Segurança,
Bata Descartável de Manga
Curta.

USO PRETENDIDO

Adequado para médicos,
enfermeiros, profissionais de
saúde, laboratório de diagnóstico
profissionais, laboratório
físico-químico e biológico
e estudantes.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|--|--|
| REGULAMENTAÇÃO | Regulamento (EU) 2017/745 |
| NORMA | ISO 13485:2016 ; EN ISO 14971:2019 ; EN ISO 1533-1:2016 ; EN 1041:2008+A1:2013 ; ISO 10993-1:2018 ; EN ISO 10993-5:2009 ; EN ISO 10993-10:2013 ; EN 13795-1:2019 |
| FABRICANTE | XIANTAO ZHONGTAI PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD 3#, Taizi Lake Industry Park, Pengchang Town, Xiantao City 433018, Hubei Province, P.R. China |
| REPRESENTANTE EUROPEU | SUNGO EUROPE B.V. Olympisch Standion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands |
| REF | WZ007-108 |
| NOME DO PRODUTO | Bata Descartável de Manga Curta |
| DESIGN | Manga curta c/ Atilhos na cintura |
| MATERIAL | SMS |
| COR | Azul Escuro |
| TAMANHOS | Único, 120 x 140 cm |
| GRAMAGEM | 40 gr |
| VALIDADE | 5 anos |
| DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO | Agosto 2022 |

CARACTERÍSTICAS

Sem látex.
Barreira prática para uma vasta gama de aplicações.
Peso leve e macio.
Boa adaptação, tacto e desempenho.

INSTRUÇÕES

A bata deve ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto:

- Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a bata.
- Colocação da bata com a face interna virada para a corpo, e a face externa virada para fora.
- Ajuste da bata ao corpo, tendo em atenção a cobertura dos membros superiores e inferiores e o ajuste adequado nas extremidades, fechando todos os sistemas de ajuste.
- A remoção da bata deve ser feita de forma a não tocar no corpo virando a bata do avesso.
- A bata deve ser descartada para um contentor de resíduos hospitalares adequados.
- Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da bata.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardados de potencial contaminação. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

ELIMINAÇÃO

Cada bata deve ser eliminada de acordo com o processo de gestão de resíduos.