

# PENSO PEDIÁTRICO ADESIVO EM POLIETILENO (PE)



## DESCRIÇÃO GERAL

O penso adesivo de PE é utilizado para cortes menores, abrasões, lacerações e pode ser usado como penso secundário sobre géis e outros pensos primários. O material é concebido para ser à prova de água e elástico.

## USO PRETENDIDO

Adequado para Hospitais e Clínicas.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Diretiva 93/42/CEE   DM Regulation (EU) 2017/745
NORMA	EN ISO 13485:2016
FABRICANTE	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. No.1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town 213144 Changzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
REPRESENTANTE EUROPEU	SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany Tel: +49-40-2513175   E-mail: antonsissi@hotmail.com
REF	PE7219A01K
NOME DO PRODUTO	Penso Pediátrico Adesivo em Polietileno (PE)
MATERIAL	Polietileno (PE) com Almofada absorvente e Papel de embrulho
COR	Personalizado/ Padrão
DIMENSÕES	72x19mm
ESTERILIZAÇÃO	Óxido de Etileno (EO)
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Junho 2020

## PROPRIEDADES

- O penso impermeável mantém as feridas secas;
- Adequado para feridas de gravidade menor a moderada, tais como cortes, arranhões e incisões menores;
- É adequado para cobrir todos os tipos de feridas mais pequenas, o material estica-se com o movimento da pele.
- Forte capacidade adesiva (adesivo médico);
- Esterilização por óxido de etileno;
- Sem látex para minimizar as reacções alérgicas.

## INFORMAÇÃO/ INDICAÇÃO ADICIONAL

- 1 Limpar e desinfetar a ferida.
2. Selecionar o tamanho adequado dos pensos e aplicar na pele seca e limpa. Aconselhamos o manuseamento apenas dos papéis protetores, a fim de evitar o contacto com a superfície ferida.
3. Substituir sempre que necessário.

## INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardado de potencial contaminação. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

## LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

## ELIMINAÇÃO

Cada penso deve ser eliminado de acordo com o processo de gestão de resíduos.

## EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.