

PENSO EM NÃO TECIDO, ESTÉRIL



DESCRIÇÃO GERAL

O penso adesivo em não-tecido é composto por material de base, papel de isolamento (ou revestimento do núcleo). O substrato é feito de filme composto de tecido não-tecido pulverizado com adesivo médico sensível à pressão. O núcleo é feito de malha (polietileno (PE) e nylon) e algodão perfurado com agulha (Viscose e poliéster).

O penso esterilizado é utilizado para protecção de feridas após desbridamento, ferida após operação e protecção umbilical para bebés. Também pode ser usado para a fixação de cateter de infusão intravenosa.

USO PRETENDIDO

Adequado para Hospitais e Clínicas.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Diretiva 93/42/CEE DM Regulation (EU) 2017/745
NORMA	EN ISO 13485:2016
FABRICANTE	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. No.1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town 213144 Changzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
REPRESENTANTE EUROPEU	SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany Tel: Tel: +49-40-2513175 E-mail: antonsissi@hotmail.com
REF	NW7219A01W
NOME DO PRODUTO	Penso em Não Tecido, Estéril
MATERIAL	Não tecido
COR	Branco
DIMENSÕES	72 x 19 cm
EMBALAGEM	100 Unidades
ESTERILIZAÇÃO	Óxido de Etileno (EO)
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Junho 2020

PROPRIEDADES

- Protecção suave e confortável, hipoalergénica;
- Forte capacidade de absorção, sem reacção alérgica cutânea;
- Protege a ferida e reduz a hipótese de infecção;
- Adequado para todos os tipos de feridas e cicatrizes.
- Feito de não tecido que permite à pele respirar;

INFORMAÇÃO/ INDICAÇÃO ADICIONAL

Limpar e desinfectar a ferida. Seleccionar o tamanho adequado dos pensos e aplicar na pele seca e limpa. Aconselhamos o manuseamento apenas dos papéis protectores, a fim de evitar o contacto com a superfície colada. Reaplicar os novos pensos sempre que necessário.

PRECAUÇÕES

1. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
2. É proibida a utilização do produto após a sua expiração.
3. A utilização repetida é proibida; O prazo de aplicação para protecção de feridas não é superior a 3 dias para feridas de trauma, feridas pós-operatórias, e protecção umbilical para bebés. O tempo limite de aplicação para fixação de cateteres não é superior a 10 dias.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardados de potencial contaminação. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

ELIMINAÇÃO

Cada penso deve ser eliminado de acordo com o processo de gestão de resíduos.

EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

APRESENTAÇÃO



DESCRIÇÃO GERAL

O penso adesivo em não-tecido é composto por material de base, papel de isolamento (ou revestimento do núcleo). O substrato é feito de filme composto de tecido não-tecido pulverizado com adesivo médico sensível à pressão. O núcleo é feito de malha (polietileno (PE) e nylon) e algodão perfurado com agulha (Viscose e poliéster).

O penso esterilizado é utilizado para protecção de feridas após desbridamento, ferida após operação e protecção umbilical para bebés. Também pode ser usado para a fixação de cateter de infusão intravenosa.

USO PRETENDIDO

Adequado para Hospitais e Clínicas.

