

# FITA ADESIVA MICROPERFURADA



## DESCRIÇÃO GERAL

A fita PE é feita de filme de PE revestida com adesivo médico de fusão a quente. Adequada para tropeções cirúrgicas gerais ou outros curativos.

## USO PRETENDIDO

Adequado para Hospitais e Clínicas.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Diretiva 93/42/CEE   DM Regulation (EU) 2017/745
NORMA	EN ISO 13485:2016
FABRICANTE	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. No.1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town 213144 Changzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
REPRESENTANTE EUROPEU	SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany Tel: Tel: +49-40-2513175   E-mail: antonsissi@hotmail.com
REF	TT250A01A
NOME DO PRODUTO	Fita Adesiva Microperfurada
MATERIAL	Polietileno
COR	Transparente
DIMENSÕES	2,5 cm x 10 m
EMBALAGEM	12 Unidades
VALIDADE	2 anos
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Junho 2020

## PROPRIEDADES

- A fita cirúrgica de PE é respirável;
- Com o material confortável e macio, não irá ferir a pele e causar reacções alérgicas;
- É transparente para que a pessoa possa observar o processo da ferida sem soltar a fita adesiva;
- Oferece uma boa fixação;
- Corte fácil.

## INFORMAÇÃO/ INDICAÇÃO ADICIONAL

1. Remover o invólucro exterior da embalagem;
2. Retirar o comprimento necessário da fita;
3. Rasgá-la e colá-la na posição desejada.

## INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado, ventilado e resguardados de potencial contaminação. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

## PONTOS DE ATENÇÃO

A superfície da pele deve estar limpa e seca, livre de líquidos e gorduras.

Em caso de qualquer dano ou queda do produto, este deve ser substituído a tempo de atingir a função fixa do produto.

## LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.


## ELIMINAÇÃO

Cada penso deve ser eliminado de acordo com o processo de gestão de resíduos.


## EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

# FITA ADESIVA MICROPERFURADA

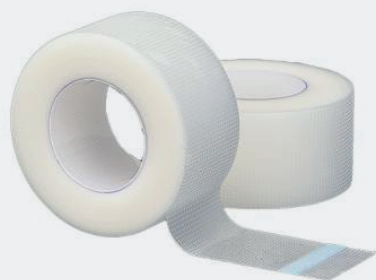

## APRESENTAÇÃO

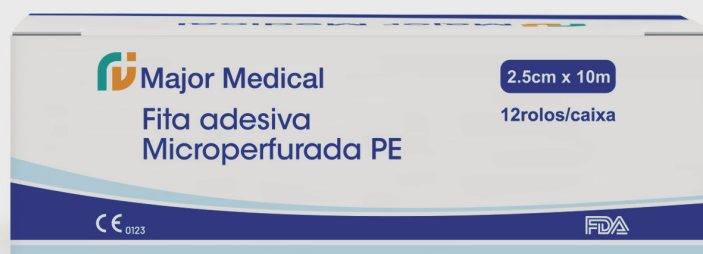

## DESCRIÇÃO GERAL

A fita PE é feita de filme de PE revestida com adesivo médico de fusão a quente. Adequada para tropeções cirúrgicas gerais ou outros curativos.

## USO PRETENDIDO

Adequado para Hospitais e Clínicas.

