

# COBRE-SAPATOS DESCARTÁVEIS C/ ANTIDERRAPANTE

**enerre**  
P H A R M A



## DESCRIÇÃO GERAL

Capa protetora para calçado.  
Proteção externa para calçados  
e descartável.

## USO PRETENDIDO

Adequado para médicos,  
enfermeiros, profissionais de  
saúde, laboratório de diagnóstico  
profissionais, laboratório  
físico-químico e biológico  
e estudantes.




**enerre**  
P H A R M A

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Regulamento (EU) 2017/745
NORMA	EN ISO 14971:2019 ; EN ISO 15223-1:2016 ; EN ISO 20417:2021 ; ISO 10993-1:2018 ; EN ISO 10993-5:2009 ; EN ISO 10993-10:2013
FABRICANTE	FEIXI HONGWEI MEDICAL DEVICES CO., LTD 2nd Floor, Building 6, Junction of Chuangxin Ave and Changgu Rd, Hefei City, Anhui, China
REPRESENTANTE EUROPEU	SUNGO EUROPE B.V. Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands Email: ec.rep@sungoglobal.com
REF	NSNS001
NOME DO PRODUTO	Cobre Sapatos Descartáveis C/ Antiderrapante
DESIGN	Repelente à água e pó
MATERIAL	PP
COR	Azul
PESO	30g
VALIDADE	60 meses
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Janeiro 2022

## ESPECIFICAÇÃO DAS MEDIDAS

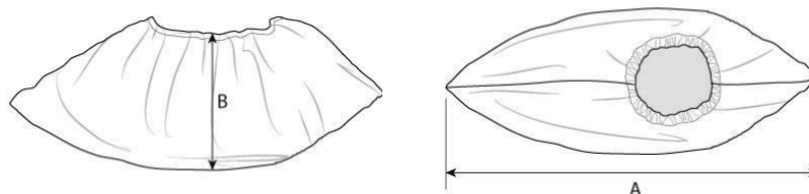

MATERIAL	PESO (GSM)	TAMANHO (CM)	LOCALIZAÇÃO MEDIDA (CM)		COR
			A	B	
PP	30	40*17	40	17	Azul
TOLERÂNCIA			±1	±1	

## CARACTERÍSTICAS

Cobre-sapatos para proteção.  
Protege toda a área do calçado.  
Não estéril.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O cobre-sapatos deverá ser manuseado de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto do cobre-sapatos:

- Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar o cobre-sapatos.
- Colocação do cobre-sapatos com a face interna virada para o calçado, e a face externa virada para fora.
- Ajuste do cobre-sapatos ao calçado, tendo em atenção a cobertura dos membros inferiores e o ajuste adequado nas extremidades.
- A remoção do cobre-sapatos deve ser feita de forma a não tocar no calçado virando o cobresapatos do avesso.
- O cobre-sapatos deve ser descartado para um contentor de resíduos hospitalares adequados.
- Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento do cobresapatos.

# COBRE-SAPATOS DESCARTÁVEIS C/ ANTIDERRAPANTE



## INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardadas de potencial contaminação. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

## LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

## EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

## ELIMINAÇÃO

Devem ser eliminados de acordo com o processo de gestão de resíduos.

## APRESENTAÇÃO



## DESCRIÇÃO GERAL

Capa protetora para calçado.  
Proteção externa para calçados  
e descartável.

## USO PRETENDIDO

Adequado para médicos,  
enfermeiros, profissionais de  
saúde, laboratório de diagnóstico  
profissionais, laboratório  
físico-químico e biológico  
e estudantes.

