

Luvas Latex Não Esterilizadas



Descrição geral

As luvas são utilizadas para proteger os profissionais de saúde e os pacientes contra possíveis contaminações, com o objetivo de prevenir doenças ou danos, em hospitais, indústrias alimentícias ou outras indústrias, laboratórios, entre outros.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CE PPE Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN ISO 13485: 2016 ; EN 455
Fabricante	RAYSEN HEALTHCARE PRODUCTS CO., Ltd. No. 3, Huanyuxi Road, Tianyu Techonoly Park, Jinghai District - China
REF	LL01
Nome Produto	Luvas Cirúrgicas Não Esterilizadas
Material	Latex Com Pó
Cor	Branco
Tamanhos	240mm +/- 5mm
Validade	5 anos

SINTOMAS

Pele	Os componentes das luvas de latex podem causar irritação e sensibilização e reação alérgica na pele em alguns indivíduos. Os sintomas podem incluir: secura, rachaduras na pele, feridas, inchaços, comichão ou erupção cutânea sob a luva. Nota: Este produto NÃO contém proteínas de látex naturais.
Reação cutânea	Caso tenha algum destes sintomas, retire imediatamente as luvas, e procure ajuda médica e/ou numa farmácia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Reatividade	Condições a evitar: Calor e luz ultravioleta; Materiais Incompatíveis: Evite o contato com agentes oxidantes fortes (por exemplo, ozônio). Produtos de decomposição perigosos: Fumo preto e fumaça, carbono monóxido e dióxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, hidrogênio cianeto e hidrocarbonetos.
Problemas ambientais	Não são esperadas questões ambientais significativas. Deve ser incinerado em instalações com lavadores. O material de embalagem de papelão deve ser separado para reciclagem.

INSTRUÇÕES (COMO COLOCAR AS LUVAS)



1. Depois de lavar bem as mãos, retirar 1 luva da caixa original



2. Tocar apenas em zonas restritas da luva, correspondendo à região do pulso



3. Colocar a 1ª luva



4. Retirar a 2ª luva, tocando apenas na zona correspondente à região do pulso



5. Para evitar tocar na pele do antebraço com a luva já vestida, pegar na superfície externa da luva que estamos a vestir, com os dedos dobrados da outra mão




6. Uma vez colocadas as luvas, as mãos não devem tocar em mais nada que não seja o que está contemplado no procedimento a efetuar


Luvas Latex Não Esterilizadas



INSTRUÇÕES (COMO RETIRAR AS LUVAS)

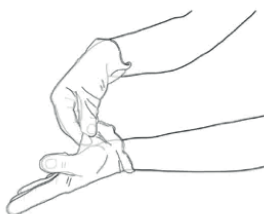

1. Pegar numa luva na zona do pulso, e sem tocar na pele do antebraço, puxar a luva completamente.

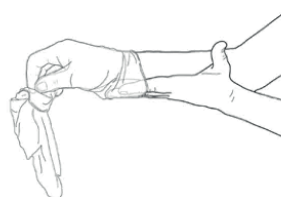

2. Manter a luva pressionada entre os dedos, e colocar a mão contrária (sem luva) entre a luva e o pulso. Remover a segunda luva, rolando até cobrir completamente a primeira



3. Colocar as luvas no contentor apropriado

DESCRIÇÃO

Luva de látex de borracha natural sem pó.

Embalado num saco ou caixa.

DICAS

1. Luva de exame de uso único para procedimentos não cirúrgicos.
2. Pessoas com sensibilidade ou alergia conhecida a luvas de latex NÃO devem usar este produto.
3. Armazene em local fresco (<25 ° C), seco e bem ventilado, longe de agentes oxidantes fortes (por exemplo, ozônio), luz solar e fontes de ignição. Não há requisitos especiais de transporte.
4. NÃO recomendado para uso com produtos químicos.

Descrição geral

As luvas são utilizadas para proteger os profissionais de saúde e os pacientes contra possíveis contaminações, com o objetivo de prevenir doenças ou danos, em hospitais, indústrias alimentícias ou outras indústrias, laboratórios, entre outros.