

# Luvas Latex Não Esterilizadas



## Descrição geral

As luvas são utilizadas para proteger os profissionais de saúde e os pacientes contra possíveis contaminações, com o objetivo de prevenir doenças ou danos, em hospitais, indústrias alimentícias ou outras indústrias, laboratórios, entre outros.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CE   PPE Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN ISO 13485: 2016 ; EN 455
Fabricante	RAYSEN HEALTHCARE PRODUCTS CO., Ltd. No. 3, Huanyuxi Road, Tianyu Techonoly Park, Jinghai District - China
REF	LL01
Nome Produto	Luvas Cirúrgicas Não Esterilizadas
Material	Latex sem Pó
Cor	Branco
Tamanhos	240mm +/- 5mm
Validade	5 anos

## SINTOMAS

Pele	Os componentes das luvas de latex podem causar irritação e sensibilização e reação alérgica na pele em alguns indivíduos. Os sintomas podem incluir: secura, rachaduras na pele, feridas, inchaços, comichão ou erupção cutânea sob a luva. Nota: Este produto NÃO contém proteínas de látex naturais.
Reação cutânea	Caso tenha algum destes sintomas, retire imediatamente as luvas, e procure ajuda médica e/ou numa farmácia.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Reatividade	Condições a evitar: Calor e luz ultravioleta; Materiais Incompatíveis: Evite o contato com agentes oxidantes fortes (por exemplo, ozônio). Produtos de decomposição perigosos: Fumo preto e fumaça, carbono monóxido e dióxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, hidrogênio cianeto e hidrocarbonetos.
Problemas ambientais	Não são esperadas questões ambientais significativas. Deve ser incinerado em instalações com lavadores. O material de embalagem de papelão deve ser separado para reciclagem.

## INSTRUÇÕES (COMO COLOCAR AS LUVAS)



1. Depois de lavar bem as mãos, retirar 1 luva da caixa original



2. Tocar apenas em zonas restritas da luva, correspondendo à região do pulso



3. Colocar a 1ª luva



4. Retirar a 2ª luva, tocando apenas na zona correspondente à região do pulso



5. Para evitar tocar na pele do antebraço com a luva já vestida, pegar na superfície externa da luva que estamos a vestir, com os dedos dobrados da outra mão




6. Uma vez colocadas as luvas, as mãos não devem tocar em mais nada que não seja o que está contemplado no procedimento a efetuar


# Luvas Latex Não Esterilizadas



## INSTRUÇÕES (COMO RETIRAR AS LUVAS)

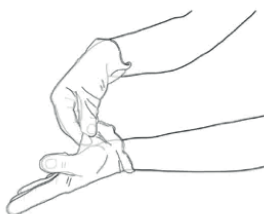

**1. Pegar numa luva na zona do pulso, e sem tocar na pele do antebraço, puxar a luva completamente.**

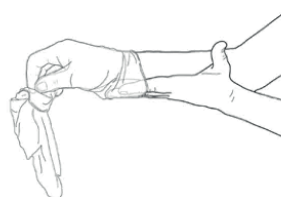

**2. Manter a luva pressionada entre os dedos, e colocar a mão contrária (sem luva) entre a luva e o pulso. Remover a segunda luva, rolando até cobrir completamente a primeira**



**3. Colocar as luvas no contentor apropriado**

## DESCRIÇÃO

Luva de látex de borracha natural sem pó.

Embalado num saco ou caixa.

## DICAS

1. Luva de exame de uso único para procedimentos não cirúrgicos.
2. Pessoas com sensibilidade ou alergia conhecida a luvas de latex NÃO devem usar este produto.
3. Armazene em local fresco ( $<25^{\circ}\text{C}$ ), seco e bem ventilado, longe de agentes oxidantes fortes (por exemplo, ozônio), luz solar e fontes de ignição. Não há requisitos especiais de transporte.
4. NÃO recomendado para uso com produtos químicos.

## Descrição geral

As luvas são utilizadas para proteger os profissionais de saúde e os pacientes contra possíveis contaminações, com o objetivo de prevenir doenças ou danos, em hospitais, indústrias alimentícias ou outras indústrias, laboratórios, entre outros.