

Máscara FFP3 Hy Confort



Descrição Geral

Design plano super dobrável, estrutura 3D e grande área de filtragem. Tiras de cabeça sem látex e clipe nasal inserido. Sem válvula de expiração, uso único.
BFE \geq 99%




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulação	PPE Regulation (EU) 2016/425
Normas	EN149:2001+A1:2009
REF	FFP3HYC
Nome do produto	Máscara de Proteção facial
Design	Máscara com filtro
Material	Non-Woven com Filtragem até 99%
Cor	Branco
Dimensões	Tamanho único
Peso	3-4 g/pc

INSTRUÇÕES

1. O lado traseiro aponta para cima. Separar a metade superior da metade inferior, para conseguir uma forma de chávena.
2. Ambas as metades devem estar completamente desdobradas.
3. Colocar a parte inferior por baixo do queixo e passar ambas as cintas por cima da cabeça.
4. Passar a cinta inferior à volta da nuca. Passar a cinta superior por cima das orelhas. Ajustar ambas as metades, puxando-as de modo a que assentem sem incomodar. Assegurar que as metades não colapsem.
5. Premir a mola do nariz com ambas as mãos contra o nariz, para adaptar assim a parte inferior ao nariz.
6. Controlar o ajuste da máscara respiratória sem válvula de exalação: Cobrir a máscara com ambas as mãos e expirar com força. Em caso de saída de ar no nariz, premir o apoio do nariz contra o nariz.

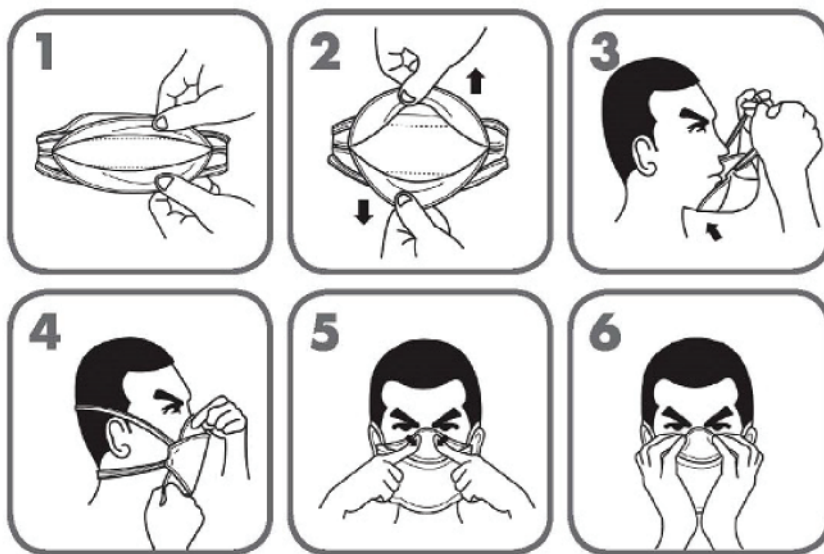

DICAS

Respeitar e seguir todas as instruções. Caso contrário a funcionalidade da máscara respiratória poderá ficar comprometida.

Este produto não fornece oxigénio. Utilizar somente em locais suficientemente arejados que apresentem uma concentração de oxigénio suficiente. Não utilizar esta máscara quando a concentração de oxigénio ficar a baixo de 19%.

Não utilizar em atmosferas explosivas.

A máscara respiratória usada deve ser descartada logo após o uso.

Proteger a embalagem da exposição solar directa.