

Touca Plástico Descartável



Descrição Geral

Eco-friendly, não-tóxico, sem latex. Feito de Polietileno.

Uso pretendido

Touca de proteção contra queda de cabelos ou outros agentes contaminantes, ajustável com elástico. Pode ser usado em Hospitais, Clínicas, Laboratórios, etc.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CE PPE Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN ISO 13485:2016
Fabricante	NINGBO SNOWWOLF OUTDOOR APPAREL CO., LTD Room 1202, Building 3, Xiangyi Fanya Guoji, No. 646 Duantang East Road, Haishu distric, 315000 Ningbo, China
REF	TCD15
Nome do produto	DM - Touca Descartável Não Estéril
Design	Touca ajustável com elástico
Material	Polietileno
Cor	Azul ou Branco
Dimensões	Tamanho único
Gramagem	15gr/m2
Validade	3 anos

APLICAÇÃO

Indicadas para vários setores laborais, tais como hospitais, laboratórios, serviços de emergência.

INSTRUÇÕES

Como colocar a touca:

1. Em caso de cabelos longos, apanhe os cabelos antes de seguir o resto do procedimento.
2. Retire a touca da embalagem.
3. Segure a touca com os dedos indicadores e polegares entre as suas duas mãos.
4. Puxe o material da touca em direções opostas.
5. Coloque as suas mãos dentro da touca já aberta e puxe em direções opostas para que faça um balão.
6. Com as mãos dentro da touca, coloque a touca por cima da sua cabeça.
7. Coloque a touca na cabeça agarrando os cabelos. E pronto, pode proceder à sua próxima tarefa.

Como remover a touca:

1. Retire a touca da cabeça.
2. Dobre a touca já usada de forma a fazer uma bola.
3. Descarte apropriadamente e não reutilize.

OUTROS DETALHES

1. A touca descartável é adequada para utilizadores masculinos e femininos.
2. Touca descartável de Plástico alta qualidade com elástico de PU.
3. Não irritante, confortável, descartável e disponível em vários tamanhos.
4. Eco-amigável, respirável, macio, leve e confortável.
5. As toucas evitam que os cabelos caiam.

