

# Avental Plástico Sem Mangas



## Descrição Geral

Avental plástico descartável, sem mangas, formato anatômico, com abertura posterior, e com 2 tiras para amarração na altura da cintura.

## Uso pretendido

Vestimenta descartável para utilização por profissionais de saúde em atividades e procedimentos cirúrgicos, com finalidade de proteção contra líquidos e secreções passíveis de contaminação. Uso externo.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CE   PPE Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN ISO 13485: 2016
Fabricante	RAYSEN HEALTHCARE PRODUCTS CO., Ltd. No. 3, Huanyuxi Road, Tianyu Techonoly Park, Jinghai District - China
REF	DA01
Classificação	Roupa protetora descartável
Nome do Produto	Avental de Isolamento Descartável
Design	Avental sem Mangas e com 2 tiras
Material	Polietileno
Cor	Transparente
Tamanhos	S / M / L / XL

## INSTRUÇÕES

- 1) Retirar da embalagem o avental somente na hora do uso.
- 2) Abrir e iniciar a colocação pela abertura para a cabeça, ajustando-o ao corpo.
- 3) utilizar as tiras de amarração para sua fixação.
- 4) Após terminar o procedimento, descartar em local apropriado.

## CUIDADOS

As condições e características do produto estarão asseguradas dentro do seu prazo de validade, desde que a sua embalagem original não esteja danificada, ou apresente sinais de violação. Nestes casos, não utilizar o produto, comunicando-se imediatamente com o fabricante. Mantenha fora do alcance das crianças.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em local fresco e seco, evitando poeira, temperaturas e umidades elevadas, inclusive durante o transporte.

## PRAZO DE VALIDADE

36 meses após fabricação.

