



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CE   PPE Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN ISO 13485: 2016 ; EN 14126
Fabricante	RAYSEN HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD No. 3, Huanyuxi Road, Tianyu Technoly Park, Jinghai District - China
REF	P02
Nome do Produto	DM - Fato Cirúrgico Descartável
Design	Fato de proteção com capuz, fecho de correr e punho elástico
Material	Tyvek
Cor	Branco
Validade	5 anos
Tamanhos	M / L / XL / XXL

## INSTRUÇÕES

1. Desinfete as mãos com água e sabão ou uma solução à base de álcool antes de colocar o fato.
2. Colocação do fato com a face interna voltada para o corpo e a face externa voltada para fora.
3. Ajuste o fato ao corpo, levando em consideração a cobertura dos membros superiores e inferiores.
4. A remoção da roupa deve ser feita de maneira a não tocar no corpo, virando a roupa de dentro para fora.
5. Volte a desinfetar as mãos após o final do uso e manuseio da roupa.
6. Após utilização colocar em lixo hospitalar.

## USO

Estes fatos devem ser usados para proteção contra borrfios leves, aerossol líquido ou baixa pressão, baixo volume, respingos, partículas sólidas no ar e contaminação radioativa, agentes infecciosos.

## INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

1. Armazene este produto em local fresco e seco.
2. As partes expostas do corpo devem ser cuidadosamente cobertas e protegidas pelo usuário.
3. Antes de usar, verificar as boas condições do produto.
4. Descarte após o uso. O descarte é limitado apenas por qualquer possível contaminação que possa ter ocorrido durante o uso.

### Descrição Geral

Fato de proteção contra as partículas secas e as projeções de produtos líquidos como aerossóis.

### Uso pretendido

Proteção contra os agentes infecciosos e inúmeras substâncias químicas inorgânicas de baixa concentração e contra a contaminação por partículas radioativas

