

# Máscara FFP3 NR

enerre  
PHARMA



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulação	PPE Regulation (EU) 2016/425
Normas	EN149:2001+A1:2009
Fabricante	HANDAN HENGYONG PROTECTIVE AND CLEAN PRODUCTS CO., LTD C-1-901, Yuyuan Plaza, 9 Yuhua West Road, Shijiazhuang, Hebei, China
CE	2797
REF	FFP3HY
Modelo	HY9330
Nome do Produto	Máscara de Proteção FFP3 NR
Design	Meia Máscara de Filtragem sem Válvula, Tipo dobrável com Elásticos, Almofada Nasal e Clipe Nasal
Material	Camada 1: Tecido Spunbonded de Polipropileno, Branco Camada 2: Fibra de filtro fundido de Polipropileno Camada 3: Tecido de filtro de poliéster Camada 4: Tecido de filtro de poliéster Camada 5: Tecido de filtro de poliéster Camada 6: Tecido Spunbonded de Polipropileno, Branco Clipe Nasal: Alumínio + PP Espuma nasal: Espuma branca macia, material PE Elásticos: Tira de elastano, Branco
Cor	Branco
Resistência de Respiração	Eficiência de filtração bacteriana $\geq 99\%$ Resistência à Inalação $\leq 3.0\text{mbar}$ @ 95 L/min Resistência à exalação $\leq 3.0\text{mbar}$ @ 160l/min
Dimensão da Máscara	210x90x75mm
Validade	3 anos

## INSTRUÇÕES

1. O lado traseiro aponta para cima. Separar a metade superior da metade inferior, para conseguir uma forma de chávena.
2. Ambas as metades devem estar completamente desdobradas.
3. Coloque a parte inferior por baixo do queixo e passe os elásticos por cima da cabeça.
4. Passe o elástico inferior à volta da nuca e o elástico superior por cima das orelhas. Ajustar ambas as metades, puxando-as de modo a que assentem sem incomodar.
5. Pressione o clipe nasal com as mãos para se adaptar ao formato do nariz.
6. Controle o ajuste da máscara: Cobrir a máscara com ambas as mãos e expirar com força. Em caso de saída de ar no nariz, premir o apoio do nariz contra o nariz.



## DICAS

Respeitar e seguir todas as instruções. Caso contrário a funcionalidade da máscara respiratória poderá ficar comprometida.

Este produto não fornece oxigénio. Utilizar somente em locais suficientemente arejados que apresentem uma concentração de oxigénio suficiente. Não utilizar esta máscara quando a concentração de oxigénio ficar a baixo de 19%.

Não utilizar em atmosferas explosivas.

A máscara respiratória usada deve ser descartada logo após o uso.

Proteger a embalagem da exposição solar directa.

## Descrição Geral

Design plano super dobrável, estrutura 3D e grande área de filtragem. Tiras de cabeça sem látex e clipe nasal inserido. Sem válvula de expiração, uso único.

BFE  $\geq 99\%$

enerre  
PHARMA

# Máscara FFP3 NR

enerre PHARMA



## APRESENTAÇÃO



### Descrição Geral

Design plano super dobrável, estrutura 3D e grande área de filtragem. Tiras de cabeça sem látex e clipe nasal inserido. Sem válvula de expiração, uso único.  
BFE  $\geq$  99%

enerre PHARMA