

# Bata Impermeável Não Estéril



## Descrição Geral

Equipamento de Segurança,  
Bata cirúrgica.

## Uso pretendido

Adequado para médicos,  
enfermeiros, profissionais de  
saúde, laboratório de diagnóstico  
profissionais, laboratório  
físico-químico e biológico  
e estudantes.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentação  | Diretiva 93/42/CEE   DM Regulation (EU) 2017/745                                                             |
| Norma           | EN ISO 13485: 2016 ; EN 13795-1:2019 ; EN 13795-2:2019                                                       |
| Fabricante      | RAYSEN HEALTHCARE PRODUCTS CO., Ltd.<br>No. 3, Huanyuxi Road, Tianyu Technoly Park, Jinghai District - China |
| REF             | B01R                                                                                                         |
| Classificação   | Classe I                                                                                                     |
| Nome do Produto | Bata cirúrgica Impermeável e Não Estéril                                                                     |
| Design          | Bata cirúrgica c/ manga e punhos elásticos<br>Fita na zona do pescoço e cintura para um ajuste correcto      |
| Material        | Polipropileno<br>100% non woven                                                                              |
| Cor             | Rosa                                                                                                         |
| Tamanhos        | M - 115 * 137 cm                                                                                             |
| Gramagem        | 35g                                                                                                          |

## INSTRUÇÕES

A bata deve ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto:

- Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a bata.
- Colocação da bata com a face interna virada para a corpo, e a face externa virada para fora.
- Ajuste da bata ao corpo, tendo em atenção a cobertura dos membros superiores e inferiores e o ajuste adequado nas extremidades, fechando todos os sistemas de ajuste.
- A remoção da bata deve ser feita de forma a não tocar no corpo virando a bata do avesso.
- A bata deve ser descartada para um contentor de resíduos hospitalares adequados.
- Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da bata.

## INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardadas de potencial contaminação

## APLICAÇÃO

Adequado para médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, laboratório de diagnóstico profissionais, laboratório físico-químico e biológico e estudantes.

## DETALHES

- Macio, leve, não tóxico, durável, ecológico, econômico.
- Impede e isola poeiras, partículas, álcool, sangue, bactérias e vírus.
- Previne a infecção entre o local de tratamento e o corpo médico.
- Respirável, conveniente, anti-estático, impermeável.

