

FFP2NR Máscara Protectora

enerre
PHARMA



Descrição Geral

Oferece conforto leve e proteção respiratória eficaz contra poeira e névoas com eficiência de filtração de 95%.

Uso pretendido

O formato em bico de pato, o design de alça e a presilha nasal garantem um uso confortável em uma variedade de tamanhos de rosto.

enerre
PHARMA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulação	PPE Regulation (EU) 2016/425
Normas	EN149:2001+A1:2009
Fabricante	DONGGUAN RYSAM MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD No. 302, Building, Dongkeng village, DongGuan, GuangDong, China
REF	RSN95B
Nome do produto	Máscara de Proteção
Design	Máscara Bico de Pato sem Válvula e c/ elásticos
Material	Tecido fundido
Cor	Verde
Dimensões	Tamanho único

INSTRUÇÕES

1. Coloque os dedos dentro da máscara. Dobre o clipe nasal em torno dos dedos para formar o formato do nariz.

2. Segure a máscara em posição sobre o nariz e a boca, puxe a correia atrás da orelha.

3. Prenda a correia ao grampo de retenção, melhore o conforto e evite vazamentos.

Nota: a correia do mesmo lado deve ser cruzado acima e abaixo da orelha.

4 Com as mãos, prenda a presilha nasal ao redor do nariz e caso seja necessário, mude a correia para garantir uma vedação facial.

5. Certifique-se que a vedação da máscara está segura.



APLICAÇÃO

Com o design da ponte nasal, a máscara é mais flexível e se adapta a quase todos os formatos de rosto. Filtra eficazmente as bactérias, pó, pelo de animais e protege a saúde.

DETALHES

Máscara Descartável;

Antibacteriano;

De 4 camadas;

Tecido não tecido para filtração segura, tecido macio;

A camada de filtro ultrafina previne com eficácia os ícones MP2,5 e as bactérias;

Eficiência de filtração PFE> 95%, eficiência de filtração BFE> 95%;

Tecido macio;

Respirável e confortável de usar.

